

Suma Med neutral

Neutralisant

Description

Suma Med neutral est un liquide doux permettant de neutraliser tous les résidus chimiques du détergent sur les surfaces des instruments chirurgicaux et ustensiles.

Propriétés principales

Suma Med neutral est un liquide doux permettant de neutraliser tous les résidus chimiques du détergent sur les surfaces des instruments chirurgicaux et des ustensiles destinés pour l'anesthésie et pour les soins intensifs.

Suma Med neutral est conçu pour être appliqué par injection dans la dernière eau de rinçage dans les automates de nettoyage/désinfection et en ultrason. Grâce à l'acide organique doux, le produit convient particulièrement pour les récipients pour cultures de tissus, les récipients en verre utilisés en laboratoire, les flacons pour infusions et les biberons.

Avantages

- Libre de tensio-actifs, ne laisse pas de résidus
- Neutralise efficacement les résidus alcalins
- Élimine les dépôts de calcaire

Mode d'emploi

Suma Med neutral est appliqué par injection dans la dernière eau de rinçage dans les automates de nettoyage/désinfection et en ultrason à une concentration de 0.2 – 2.0 g/L. Le produit se dose à l'aide des systèmes de dosage automatique de Diversey ou à l'aide d'une pompe de dosage intégrale livrée par le fabricant de machine.

Données techniques

Aspect	Liquide clair
pH	1.5
Densité relative	1.17

Les données inscrites ne sont qu'indicatives pour le produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité.


Conserver le produit dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri des températures extrêmes.

Compatibilité du produit

Suivant nos instructions d'utilisation, **Suma Med neutral** est adapté à tous les matériels généralement rencontrés dans les hôpitaux.

Conditionnements disponibles

Code article	Conditionnement
7511764	2x5L

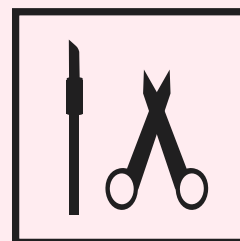

Suma Med neutral

Diversey Belgium BVBA

Industriezone Kampenhout-Sas

Zone II

Haachtsesteenweg 672

1910 Kampenhout

België

Tel. : +32 (0)16 61 77 77

Fax : +32 (0)16 60 53 95

www.diversey.com

P01156BEFR-01

© Copyright 2011 Diversey